

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doküman Kodu	MC.TL.01
		Yayın Tarihi	02.09.2024
		Revizyon Tarihi	00
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/2

CİHAZ KULLANIM VE BAKIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimat, merkezimizde kullanılan tıbbi cihazların doğru, güvenli ve etkin kullanımını sağlamak, arızaları önlemek ve cihaz ömrünü uzatmak amacıyla bakım ve kullanım esaslarını belirlemek için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat; diş ünitleri, otoklavlar, kompresörler, röntgen cihazları, el aletleri ve benzeri tüm medikal cihazları kapsar.

3. SORUMLULAR

- Cihazı kullanan tüm sağlık personeli
- Teknik servis birimi
- Biyomedikal birimi (varsa)
- Kalite yönetim birimi

4. UYGULAMA

4.1 CİHAZ KULLANIMI

- Cihazlar yalnızca **yetkili ve eğitimli personel** tarafından kullanılmalıdır.
- Her cihazın **kullanım kılavuzu** erişilebilir bir yerde bulundurulmalıdır.
- Kullanımdan önce cihazın **fiziksel durumu, kabloları, göstergeleri ve bağlantıları** kontrol edilmelidir.
- Cihaz çalıştırılmadan önce üretici talimatlarına göre ayarlamalar yapılmalı, gerekli sarf malzemeleri kontrol edilmelidir.
- Cihazın kullanımı sırasında oluşabilecek olağan dışı durumlar derhal teknik birime bildirilmeli ve cihaz kullanılmamalıdır.

4. CİHAZ BAKIMI

4.2.1 Günlük Bakım (Kullanıcı tarafından yapılır):

- Cihaz kullanımı sonrası **dış yüzeyi dezenfekte edilir**,
- Hava ve su kanalları (ünit için) temizlenir,
- Filtreler ve toplama hazneleri (varsa) kontrol edilir,
- Gözle görülen kir, sıvı veya arıza belirtileri not edilir.

4.2.2 Periyodik Bakım (Yetkili teknik servis veya biyomedikal):

- **Aylık / 3 aylık / 6 aylık** periyotlarla yapılır (cihaz türüne göre değişir),
- Yağlama, parça değişimi, kalibrasyon gibi işlemler teknik dokümana göre uygulanır,
- Bakım kayıtları tutulur ve cihaz üzerine bakım etiketi yapıştırılır.

5. ARIZA DURUMUNDA YAPILACAKLAR

- Cihazda herhangi bir arıza tespit edilirse **derhal servis dışı bırakılır**,

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doküman Kodu	MC.TL.01
		Yayın Tarihi	02.09.2024
	CİHAZ KULLANIM VE BAKIM TALİMATI	Revizyon Tarihi	00
		Revizyon No	00
		Sayfa No	2/2

- "Arızalıdır – Kullanmayınız" etiketi yapıştırılır,
- Teknik servis birimine **Arıza Bildirim Formu** iletilir,
- Gerekli onarım süreci tamamlanana kadar cihaz kullanılmaz.

6. KAYITLAR

- **Cihaz Kullanım Kayıtları,**
- **Günlük Bakım Kontrol Formları,**
- **Periyodik Bakım Formları,**
- **Arıza ve Müdahale Formları,**
- Tüm belgeler kalite sistemi kapsamında 5 yıl süreyle arşivlenir.

7. EĞİTİM

Cihazları kullanacak tüm personel, cihazın özelliklerine göre **eğitim almalı** ve eğitim dokümanları dosyalanmalıdır.

8. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Cihaz Kullanım Kılavuzları
- SKS Talimatları
- Kalite Yönetim Sistemi Formları
- TİTCK/ÜTS Bildirim Prosedürleri